

Basic

Aspiratore chirurgico

ISTRUZIONI PER L'USO

AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTENZE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può condurre alla morte o a gravi lesioni.

ATTENZIONE
Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può condurre a lesioni moderate o lievi.

SUGGERIMENTO RELATIVO ALLA SICUREZZA
Indica informazioni utili per l'utilizzo in sicurezza del dispositivo.

Il modello Basic è approvato esclusivamente per l'utilizzo descritto nelle presenti istruzioni per l'uso. Medela può garantire il funzionamento sicuro del sistema solo se Basic è utilizzato in combinazione con accessori originali Medela (sistema di raccolta, tubi, filtri ecc.; consultare il capitolo "Panoramica degli accessori").

NOTA IMPORTANTE

- Leggere e rispettare queste avvertenze e istruzioni di sicurezza prima dell'uso. Prima dell'uso, acquisire familiarità con i segnali informativi associati e le istruzioni per la risoluzione dei problemi (vedere i capitoli "Installazione" e "Risoluzione dei problemi"). Queste istruzioni devono essere conservate per riferimento insieme al dispositivo.
- Le presenti istruzioni per l'uso costituiscono una guida generale per l'impiego del prodotto. Per qualsiasi questione medica rivolgersi a un medico. Il medico è responsabile del rispetto delle procedure e delle tecniche operative corrette. Ogni medico deve valutare se il trattamento è adeguato, basandosi sulle proprie conoscenze e sulla propria esperienza. Medela è responsabile esclusivamente per gli effetti sulla sicurezza di base, per l'affidabilità e per le prestazioni di Basic, purché utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso.
- Il medico è responsabile del rispetto delle procedure e delle tecniche operative corrette. Ogni medico deve valutare se il trattamento è adeguato, basandosi sulle proprie conoscenze e sulla propria esperienza.
- Qualsiasi incidente grave che si sia verificato in relazione al dispositivo deve essere segnalato a Medela AG e alla relativa autorità competente.

AVVERTENZE

Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziale contaminazione crociata o di esposizione a rischi biologici

- Dopo ogni uso, le parti che sono state a contatto con le secrezioni aspirate devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate o smaltite, secondo le istruzioni per il ricondizionamento.
- Il tubicino di collegamento fornito con il dispositivo non deve mai entrare a contatto diretto con l'area di suzione. Si deve utilizzare sempre un catetere di suzione sterile (rischio di infezione).

Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a un uso non corretto

- Esclusivamente per l'uso da parte di persone con formazione medica, adeguatamente addestrate alle procedure di suzione e all'uso di aspiratori.
- Prima di utilizzare Basic, consultare le indicazioni d'uso e considerare i fattori di rischio e le controindicazioni. La mancata lettura e l'inosservanza di tutte le istruzioni riportate nel presente manuale prima dell'uso possono comportare lesioni gravi o mortali per il paziente.
- Non addepire per l'impostazione a basso livello di vuoto, come necessario, ad esempio, per il drenaggio toracico senza accessori specializzati.
- Non omologato per uso esterno o per applicazioni di trasporto.

Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni durante la configurazione o l'uso

- Non è consentita alcuna modifica di questa apparecchiatura.
- Non collegare il dispositivo a un tubo di drenaggio passivo.
- L'aspiratore Basic è stato testato in combinazione con gli accessori elencati nella sezione "Panoramica degli accessori". Per un uso corretto e sicuro, usare l'aspiratore Basic soltanto con questi accessori. Ulteriori informazioni sono disponibili nel foglio di istruzioni dei singoli accessori.

Avvertenza: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a interferenze con altri dispositivi

- Non utilizzare l'aspiratore Basic in prossimità di altre apparecchiature né sovrapporlo a esse. Se tali condizioni d'uso sono indispensabili, osservare attentamente l'aspiratore Basic per verificarne il funzionamento normale nella configurazione in cui sarà usato.
- L'uso di accessori o cavi diversi da quelli forniti dal produttore di questo dispositivo può causare un aumento delle emissioni elettromagnetiche o una riduzione dell'immunità elettromagnetica di questo aspiratore, con conseguente funzionamento improprio.
- I dispositivi di comunicazione a radiofrequenza portatili (tra cui periferiche come ad esempio cavi di antenne e antenne esterne) devono essere usati a una distanza minima di 30 cm dall'aspiratore Basic, compresi i cavi (cavo di alimentazione, interruttore a pedale, carrello) specificati dal produttore. Altrimenti, potrebbe verificarsi una riduzione delle prestazioni di questo apparecchio.

Avvertenza: per ridurre il rischio di scosse elettriche o di esposizione a calore, incendio, esplosione

- Per evitare il rischio di scosse elettriche, l'apparecchio deve essere collegato esclusivamente a una presa di rete fissa dotata di sistema di protezione con messa a terra.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato per la suzione di liquidi esplosivi, facilmente infiammabili o corrosivi.
- Prima del ricondizionamento, scollegare il dispositivo dalla presa di rete fissa.
- Scollegare la spina dalla presa di rete prima di sostituire il fusibile.
- L'aspiratore Basic è alimentato dalla rete elettrica. Prima di collegare l'aspiratore all'alimentazione elettrica, verificare che l'alimentazione elettrica locale corrisponda alla potenza nominale indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

ATTENZIONE

Attenzione: per ridurre il rischio di potenziale contaminazione crociata o di esposizione a rischi biologici

- Prima dell'apertura, ispezionare visivamente la confezione del dispositivo per verificare la presenza di eventuali danni.
- Non utilizzare i dispositivi con confezione danneggiata.
- I dispositivi riutilizzabili vengono forniti non sterili e devono essere ricondizionati prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo in conformità al capitolo "Linee guida generali per il ricondizionamento".
- Durante il ricondizionamento dei dispositivi, indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti monouso e altri DPI secondo le linee guida e le normative locali.
- Trattamento al punto di utilizzo con acqua di rete ($\leq 40^{\circ}\text{C}$, $\approx 104^{\circ}\text{F}$). La mancata osservanza di questa precauzione può causare il fissaggio dei residui e pertanto inibire la disinfezione..

Attenzione: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a un uso non corretto

- L'uso improprio può causare dolore e lesioni al paziente.
- Il paziente deve essere monitorato regolarmente in base alle istruzioni del medico o alle linee guida interne dell'ospedale. Le indicazioni oggettive o i segni di una possibile infezione del paziente o di una complicità (ad esempio febbre, dolore, arrossamento, aumento del calore, gonfiore o fuoriuscite purulente) devono essere osservati immediatamente. La mancata osservanza di tale prescrizione può comportare situazioni di pericolo per il paziente.
- Monitorare con frequenza lo stato di funzionamento dell'aspiratore Basic.
- Quando l'aspiratore Basic viene utilizzato per il drenaggio delle ferite, la pressione negativa deve essere impostata secondo le istruzioni dello specialista e non deve causare danni alla ferita.

Attenzione: per ridurre il rischio di potenziali lesioni durante la configurazione o l'uso

- La versione per carrello necessita di una distanza minima di 5 cm dall'involucro per evitare il surriscaldamento del dispositivo.

Attenzione: per ridurre il rischio di potenziali lesioni dovute a interferenze con altri dispositivi

- Le apparecchiature di comunicazione wireless, come dispositivi di rete domestica wireless, telefoni cellulari, cordless e relative stazioni base e ricetrasmittitori palmari, possono influenzare il funzionamento dell'aspiratore Basic e devono essere mantenute a una distanza di almeno 30 cm dall'apparecchiatura (aspiratore, cavo di alimentazione, interruttore a pedale, carrello).

Attenzione: per ridurre il rischio di scosse elettriche o di esposizione a calore, incendio, esplosione

- Per evitare il surriscaldamento del dispositivo, lo scarico posto sul fondo dell'aspiratore non deve risultare ostruito quando l'aspiratore è in funzione.

SUGGERIMENTO RELATIVO ALLA SICUREZZA

- Per quanto concerne i test di sicurezza, l'aspiratore deve essere sottoposto a manutenzione e riparazione per tutta la durata utile in conformità con il manuale di assistenza.
- La protezione dell'aspiratore Basic contro gli effetti di scarica di un defibrillatore cardiaco dipende dall'impiego dei cavi appropriati.
- La separazione del dispositivo dalla rete elettrica è garantita solo tramite l'interruzione del collegamento tra la spina e la presa di rete fissa.
- Dispositivi di interfaccia di terzi (ad es. cannule, cateteri) devono poter essere collegati senza influire le prestazioni dell'aspiratore.
- Assicurarsi che l'aspiratore funzioni correttamente prima dell'uso; vedere la sezione sulla preparazione per l'uso
- Evitare il contatto dei fluidi con le estremità della presa di rete o con l'attacco di ingresso di alimentazione.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Consultare le istruzioni per l'uso dei dispositivi da utilizzare con Basic per eventuali controindicazioni nelle specifiche indicazioni per l'uso.
- Per qualsiasi uso dell'aspiratore, indossare sempre i guanti.
- Basic è un dispositivo medicale che richiede speciali misure di sicurezza in merito alla compatibilità elettromagnetica. Deve essere installato e messo in funzione in conformità a quanto riportato dalle informazioni EMC nel capitolo "Documentazione tecnica".
- L'aspiratore Basic non è idoneo per la risonanza magnetica (RM). Non introdurre l'aspiratore nell'ambiente RM.
- In caso di traboccamento, informare immediatamente il servizio tecnico interno ed eseguire le operazioni descritte nel manuale di assistenza.
- In ognuno dei seguenti casi, il dispositivo non deve essere utilizzato e deve essere riparato dal servizio di assistenza clienti Medela:
 - il cavo di alimentazione elettrica o la spina sono danneggiati;
 - se il dispositivo non funziona correttamente
 - il dispositivo è danneggiato
 - il dispositivo presenta difetti evidenti legati alla sua sicurezza.
- Tenere il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore.
- La presa di rete deve essere tenuta lontano dall'umidità.
- Non tirare mai il cavo di alimentazione per estrarre la spina dalla presa di rete!
- Non lasciare mai incustodito il dispositivo quando è acceso.
- Durante l'uso l'aspiratore deve trovarsi in posizione verticale.
- Non utilizzare mai il dispositivo in presenza di elevata temperatura ambiente, quando si è molto stanchi o in un ambiente a rischio di esplosione.
- Non mettere mai il dispositivo in acqua o in altri liquidi.
- Quando si usano prodotti sterili monouso, tenere presente che non sono destinati al ricondizionamento. Il ricondizionamento può provocare la perdita di caratteristiche meccaniche, chimiche e/o biologiche. Il riuso può causare contaminazione crociata.
- Contattare il rappresentante locale del servizio di assistenza clienti Medela per ricevere assistenza sull'uso del prodotto.
- Utilizzare l'apparecchiatura di aspirazione Medela esclusivamente per la rimozione dei fluidi corporei. Non utilizzare apparecchiature di aspirazione Medela per la somministrazione di fluidi corporei.

Tenere le istruzioni per l'uso a portata di mano per una futura consultazione.

INTRODUZIONE

Introduzione
Basic è un aspiratore di alta qualità che offre massime prestazioni per molteplici esigenze di aspirazione. Associa in modo ideale la facilità d'uso e di ricondizionamento con caratteristiche di sicurezza per garantire un funzionamento ottimale. La vasta scelta di accessori proposta da Medela consente di configurare l'aspiratore per le più diverse applicazioni medicali.

Finalità/uso previsto
L'uso previsto dell'aspiratore Basic è la produzione di un vuoto costante nell'intervallo da 0 a –90 kPa.

Indicazioni per l'uso
L'aspiratore Basic è indicato per tutte le applicazioni che richiedono vuoto, come chirurgia generale, liposuzione, endoscopia, ablazione epicardica, suzione nasofaringea, neurochirurgia, OPCAB, parto cesareo/assistito con vuoto e drenaggio delle ferite in ospedali, cliniche e studi medici.

Controindicazioni
Non vi sono controindicazioni note per l'aspiratore Basic.




Utilizzatore previsto
L'aspiratore Basic deve essere utilizzato esclusivamente da operatori sanitari che abbiano familiarità con le procedure di aspirazione e dal personale dedicato al ricondizionamento. L'operatore non deve essere affetto da problemi di udito né da sordità e deve possedere una sufficiente facoltà visiva.

Popolazione di pazienti destinataria
L'aspiratore Basic è destinato solo all'uso su pazienti che presentano esclusivamente le condizioni descritte nelle indicazioni per l'uso.

Effetti collaterali indesiderati
Non sono noti effetti collaterali associati all'aspiratore Basic.

PANORAMICA

Definizione di vuoto
Durante l'applicazione di dispositivi medici di suzione, il vuoto viene creato generalmente per differenza (in cifre assolute) tra la pressione assoluta e la pressione atmosferica o come valori negativi in chilopascal (kPa). Nel presente documento l'indicazione di –10 kPa, ad esempio, è sempre riferito a un intervallo di pressione in kPa al di sotto della pressione atmosferica nell'ambiente (secondo i termini e le definizioni della norma EN ISO 10079:1999).

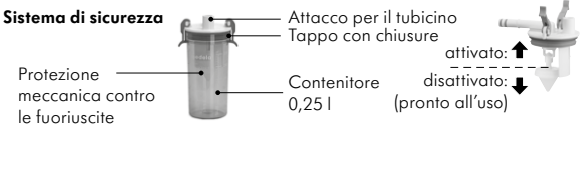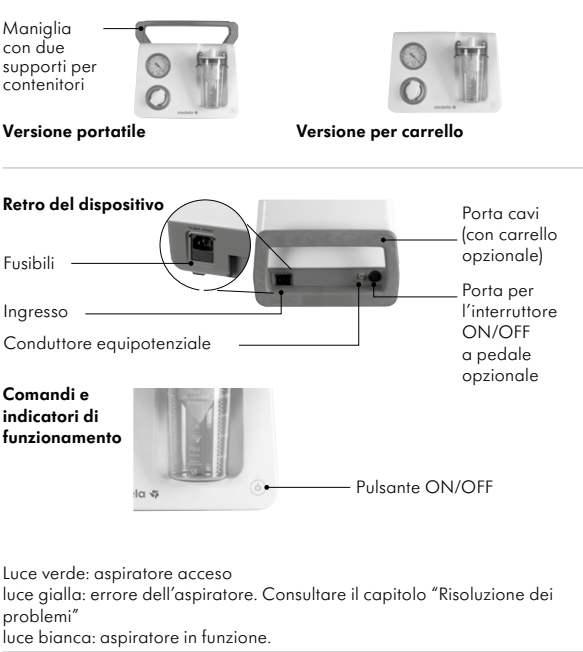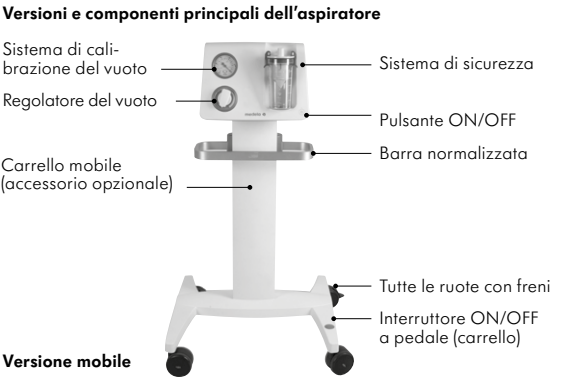

INSTALLAZIONE

1 Verifica iniziale alla consegna
Verificare la completezza e le condizioni generali del contenuto della confezione di Basic.



2 Rimuovere il blocco per il trasporto

- 1.1 Rimuovere il foglietto rosso.
- 1.2 Rimuovere le 3 viti e conservarle per usi futuri.

3 Configurazione della versione mobile (se disponibile)

- 1.1 Posizionare la parte superiore del carrello sulla parte inferiore, accertandosi che il tubicino si inserisca come illustrato.
- 1.2 Collegare i componenti con 4 viti.

- 2.1 Posizionare l'aspiratore sul carrello. Accertarsi che la parte anteriore dell'aspiratore e la guida standard siano rivolti in avanti.
- 2.2 Collegare l'aspiratore con 4 viti.
- 2.3 Collegare il porta cavi all'aspiratore con le due viti.

4 Montaggio del morsetto in plastica opzionale (quando si utilizza il carrello opzionale)

- 1.1 Tenere premuta la manopola azzurra di rilascio.
- 1.2 Collegare il morsetto in plastica alla guida standard rilasciando la manopola azzurra.

5 Configurazione del sistema di sicurezza

- 1.1 Collegare la protezione meccanica contro le fuoriuscite al tappo. Tirare delicatamente verso il basso per accertarsi che sia aperta/disattivata.
- 1.2 Porre il tappo sul contenitore.
- 1.3 Fissare il tappo mediante le due chiusure.

- 2.1 Collegare il sistema di sicurezza all' aspiratore.

- 3.1 Per il ricondizionamento, rimuovere il sistema di sicurezza dall'aspiratore e smontarlo invertendo i passaggi 1.3, 1.2 e 1.1.

PREPARAZIONE PER L'UTILIZZO

AVVERTENZA
• Esclusivamente per l'uso da parte di persone con formazione medica, adeguatamente addestrate alle procedure di suzione e all'uso di aspiratori.

Nota
• Per qualsiasi uso dell'aspiratore, indossare sempre i guanti.

ATTENZIONE

- Durante l'uso, l'aspiratore Basic deve essere in posizione verticale.
- La versione per carrello richiede una distanza minima di 5 cm dall'involucro per evitare il surriscaldamento del dispositivo. La parte posteriore del contenitore deve essere aperta.
- Verificare l'integrità della confezione degli accessori sterili prima di utilizzarli.

1 Verifiche prima dell'utilizzo

- Prima dell'uso, verificare il sistema Basic per individuare eventuali danni al cavo o alla spina di alimentazione, danni evidenti al dispositivo o difetti che ne compromettano la sicurezza e il corretto funzionamento.
- Verificare la completezza e le condizioni generali della confezione dell'aspiratore Basic.
- Verificare tutti gli accessori prima dell'utilizzo:
 1. contenitori di suzione, coperchi e sacche, per escludere rotture, punti fragili e difetti. Sostituirli se necessario.
 2. Tubi, per individuare rotture e punti fragili; verificare che i connettori siano collegati saldamente. Sostituirli se necessario.
 3. Come test di sicurezza supplementare, portare il sistema (contenitori inclusi) al massimo del vuoto prima dell'utilizzo effettivo.

2 Montaggio della configurazione di base

- 1.1 Accertarsi che il sistema di sicurezza sia collegato all' aspiratore Basic. Vedere i capitoli "Installazione" e "Impostazione del sistema di sicurezza".

- 2.1 Se necessario, collegare un filtro al sistema di sicurezza con la freccia rivolta in direzione del flusso.
3. Collegare tutti gli accessori necessari in funzione delle esigenze. Vedere "Panoramica degli accessori".

3 Montaggio dell'interruttore a pedale opzionale

- 1.1 Collegare l'interruttore a pedale opzionale all'aspiratore, inserendo il connettore.
- 1.2 Verificare il corretto funzionamento dell'interruttore a pedale.

4 Montaggio dei sistemi di raccolta
Consultare le schede di istruzioni del sistema di raccolta monouso Medela, del sistema di raccolta riutilizzabile Medela e del filtro monouso Medela forniti con gli articoli associati per trovare le istruzioni di montaggio e tutte le informazioni relative all'uso degli accessori e del sistema di raccolta.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN FUNZIONE

AVVERTENZA

- L'aspiratore Basic è alimentato dalla rete elettrica. Prima di collegare l'aspiratore all'alimentazione elettrica, verificare che l'alimentazione elettrica locale corrisponda alla potenza nominale indicata sulla targhetta dei dati tecnici.

Nota

- L'aspiratore Basic deve essere configurato in modo che la separazione dall'alimentazione di rete risulti semplice.
- Per qualsiasi uso dell'aspiratore, indossare sempre i guanti.

1 Collegare l'aspiratore Basic alla rete elettrica

1. Verificare l'aspiratore prima dell'uso seguendo le istruzioni nel capitolo "Preparazione prima dell'uso".
- 2.1 Collegare il cavo di alimentazione all'apposito ingresso situato sul retro dell'aspiratore. Utilizzare la staffa di montaggio per fissare il cavo nell'attacco di ingresso.
- 2.2 Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa di rete fissa.
- 3.1 Viene eseguito un test interno di autodiagnosi. Quando il LED verde si accende, il dispositivo è pronto all'uso.

2 Selezionare il vuoto massimo

- 1.1 Accendere l'aspiratore Basic.

- 2.1 Ruotare il regolatore del vuoto verso destra per impostare il vuoto al massimo.

- 3.1 Serrare l'estremità del tubicino paziente con il pollice.
- 3.2 Confrontare il vuoto massimo secondo le specifiche (di seguito). Se il vuoto non viene raggiunto, consultare i capitoli "Risoluzione dei problemi" e "Vuoto insufficiente".

Specifiche del vuoto	Pressione minima	Pressione minima	Pressione minima
Posizione (sul livello del mare)			
+ 3000 m	– 61 kPa	– 610 mbar	– 458 mmHg
+ 2000 m	– 70 kPa	– 700 mbar	– 525 mmHg
+ 1000 m	– 79 kPa	– 790 mbar	– 592 mmHg
+ 500 m	– 84 kPa	– 840 mbar	– 630 mmHg
0 m	– 90 kPa	– 900 mbar	– 675 mmHg

ATTENZIONE

- Quando l'aspiratore Basic viene utilizzato per il drenaggio delle ferite, la pressione negativa deve essere impostata secondo le istruzioni dello specialista e non deve causare danni alla ferita.

3 Modifica del livello di vuoto

- 2.1 Fissare il tubicino paziente con il morsetto.
- 2.2 Ruotare il regolatore del vuoto per selezionare il vuoto corretto a seconda dell'applicazione specifica. Per aumentare il vuoto, ruotare il regolatore in senso orario.
- 2.3 Verificare l'impostazione con il vacuometro.

AVVERTENZA

- Dopo ogni uso, le parti che sono state a contatto con le secrezioni aspirate devono essere pulite, disinfettate, sterilizzate o smaltite, secondo le istruzioni per il ricondizionamento.

ATTENZIONE

- I dispositivi riutilizzabili vengono forniti non sterili e devono essere ricondizionati prima del primo utilizzo e dopo ogni utilizzo in conformità al capitolo "Linee guida generali per il ricondizionamento".

4 Spegnimento dopo l'utilizzo


- 1.1 Premere il pulsante ON/OFF per spegnere l'aspiratore.

- 2.1 Scollegare la spina dalla presa di rete.
3. Pulire e disinfettare l'aspiratore Basic. Vedere il capitolo "Linee guida generali per il ricondizionamento".

CONFIGURAZIONE PER PARTO ASSISTITO CON VUOTO

Nota

- L'aspiratore Basic deve essere configurato in modo da facilitarne la separazione dalla rete elettrica.

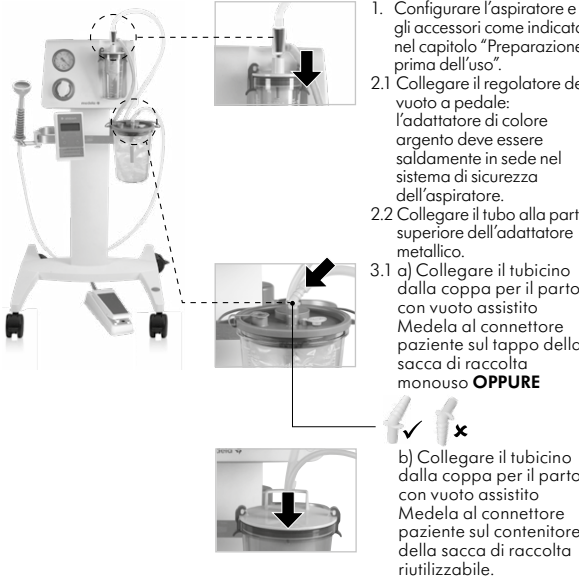

- 4.1 Accendere la pompa, impostare il vuoto al massimo, fissare il tubicino dalla coppa per il parto con vuoto assistito Medela e premere a fondo il regolatore del vuoto (in avanti e verso il basso, usando l'avampiede).
- 4.2 Confrontare il vuoto massimo secondo le specifiche (vedere la tabella precedente).

- 5.1 Se OK, rilasciare il vuoto riportando il regolatore del vuoto a pedale alla posizione di riposo "pressione ambiente o vuoto zero" (indietro e verso il basso, usando il tallone).
- 5.2 L'aspiratore è ora pronto per l'utilizzo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Vuoto insufficiente
Verificare che:

- il regolatore del vuoto sia impostato correttamente.
- i tubi non siano difettosi o rotti. Se necessario, sostituirli.
- tutti i collegamenti siano ben serrati.
- la protezione antiriboccamento sia disattivata/aperta. Se la protezione antiriboccamento è attivata, disattivarla come mostrato nei capitoli "Installazione" e "Impostazione del sistema di sicurezza".
- il contenitore di suzione e il tappo non presentino rotture, zone fragili, scoloriture. Se necessario, sostituirli.
- il sistema monouso non presenti rotture, zone fragili, scoloriture. Se necessario, sostituirlo.
- il filtro non sia ostruito. Per verificare se il filtro è ostruito, fare riferimento alla scheda di istruzioni fornita con i filtri.

Se il problema non può essere risolto, contattare il reparto tecnico interno.

Nessun LED acceso
L'aspiratore Basic non è collegato alla rete elettrica oppure occorre sostituire il fusibile.

Indicatore a LED giallo acceso
Caso di minore gravità: l'indicatore a LED giallo è acceso, ma l'aspiratore può essere acceso e spento:
• contattare il reparto tecnico interno o il centro di assistenza autorizzato alla prima occasione.

Caso di maggiore gravità: l'indicatore a LED giallo è acceso e l'aspiratore non può essere acceso e spento:
• contattare il reparto tecnico interno o il centro di assistenza autorizzato per riparazioni/manutenzione.

Il motore non funziona
Verificare che:

- quando l'aspiratore Basic è acceso. Il LED di standby deve essere acceso.
- la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa di rete fissa e nell'apposito ingresso sull'apparecchio.
- il fusibile sul retro dell'aspiratore Basic non sia difettoso. Per sostituire il fusibile difettoso, seguire il capitolo "Sostituzione di un fusibile difettoso".

Se il problema non può essere risolto, contattare il reparto tecnico interno.

SOSTITUZIONE DI UN FUSIBILE DIFETTOSO

AVVERTENZA

- Scollegare la spina dalla presa di rete prima di sostituire il fusibile.

Seguire le istruzioni riportate nel manuale di assistenza [REF 200.6366] per sostituire i fusibili (T 1,6 AH, 250 V CA, 5 x 20 mm) dell'aspiratore Basic.

